




Anweisungen zum Gebrauch des Troop Elevation Pillow. (Entwickelt zum Gebrauch mit einem normalen Intubationskissen). (Man lege ein Laken quer unter das Kissen. Dies ermoglicht es, wenn noetig, den Patienten zusammen mit dem Kissen zu bewegen.)



Den O.P. Tisch leicht nach unten verstellen...das erleichtert den Transfer des Patienten; nach dem Transfer wieder hoch stellen um die H.E.L.P. Position zu erreichen. Ein normales Kissen unter die Knie des Patienten legen.)

Benutzen Sie den undurchdringlichen Schutzbezug fuer das Schaum-oder mit Kunststoff bezogene Elevation Pillow.

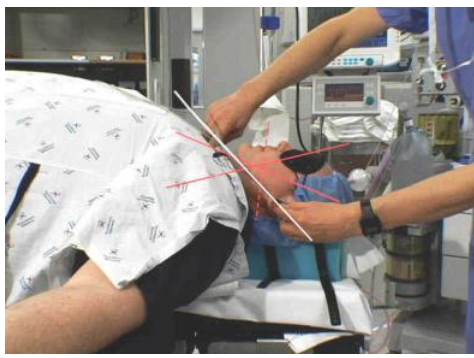

Fuer Patienten mit extremem Uebergewicht von vollkommen flacher Lage zur erhoeten Laryngoscopy Kopflage

(Teaching web site...www.troopelevationpillow.com)

(For more information; please contact [Mercury Medical](http://www.mercurymed.com) @ 1-800-237-6418 www.mercurymed.com)