




El Posicionador Troop Elevation Pillow / Instrucciones para montar
(Diseñado par uso con una almohada Standard de intubación)
(Coloque una sabana abajo del posicionador Elevación Pillos (EP); si se necesita
Para facilitar mover al paciente como una 'unidad' con el EP)



(Ponga la mesa de Sala de operaciones (O.R.) en una posición echa atrás ... para facilitar transferencia del paciente; después de transferir al paciente incline la espalda para Lograr la posición. In English: H.E.L.P. = (Head Elevated Laryngoscopy Position)
 (Coloque una almohadilla regular bajo las rodillas del paciente)

Utilice una cobertura como barrera para la Espuma o el Vinilo del Elevation Pillow

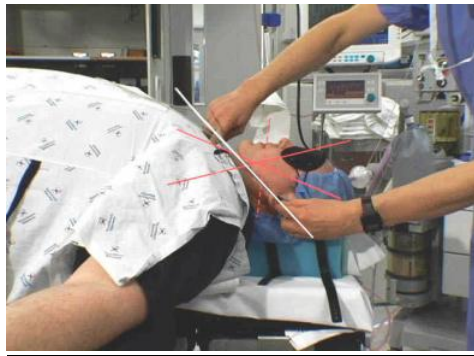

Paciente Mórbido Obeso: completamente de espaldas planas a la posición
De cabeza elevada posicionada propiamente para laringoscopia
(H.E.L.P.) In English: Head Elevated Laryngoscopy Position

Página web docente www.troopelevationpillow.com

Para más información por favor contactar **Mercury Medical** @ 1-800-237-6418 www.mercurymed.com