



L'Oreiller d'Élévation Troop/Directives d'Installation

(Conçu pour être utilisé avec un oreiller d'intubation standard)


Placer un "trans-drap" sous l'Oreiller d'Élévation (OE); au besoin, cela facilitera le déplacement simultané du patient et de l'(OE).



(Fixer la table d'opération dans une position légèrement abaissée... ceci facilite le transfert du patient; post- transfert du patient, élever le dos pour atteindre **la position T.E.P.L.**

(Placer un oreiller "ordinaire" d'hôpital sous les genoux du patient)

Utilisez la couverture protectrice pour l'Oreiller d'Élévation en mousse jetable ou l'Oreiller d'Élévation recouvert de vinyle.

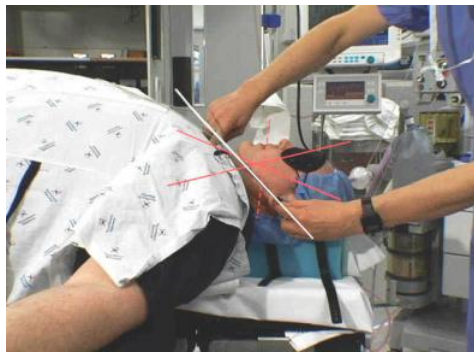

Patient morbidement obèse : de la position complètement couché sur le dos, à la position « Tête Élevé Position Laryngoscopie » T.E.P.L.

(Teaching web site...www.troopelevationpillow.com)

(Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Mercury Medical @ (1-800-237-6418) www.mercurymed.com)