



The Troop Elevation Pillow / Istruzioni d'uso


(Disegnato per l'uso con il cuscino d'intubazione standard)
(Collocare un lenzuolo di traverso al di sotto del Cuscino di Elevazione(CE); se c'è bisogno, così facilità lo spostamento del paziente insieme con il (CE))



(Posiziona il tavolo operatorio in posizione leggermente giù ...tale aiuta a trasferire il paziente; dopo il trasferimento posiziona il tavolo operatorio nella posizione Laringoscopy con la Testa Elevata

(Mettere un cuscino 'regolare' sotto le ginocchie del paziente)

Usare la Protezione per la gomma piuma o Cuscino di Elevazione Coperto con il Vinile

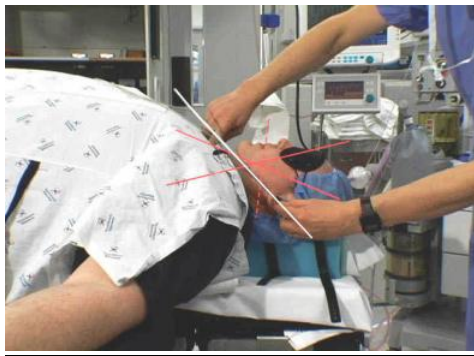

Il Paziente Morbosamente Obeso: dalla posizione completamente supina alla Posizione Laringoscopy con la Testa Elevata

(Sito internet con le istruzioni... www.troopelevationpillow.com)

(Per l'ulteriori informazioni, si prega di contattare: **Mercury Medical** @ 1-800-237-6418 www.mercurymed.com)