

Tipps zum Gebrauch des Troop Elevation Pillow (EP)

1. Legen Sie das E.P. an den Kopf des O.P. Tisches und beziehen Sie das E.P. mit dem angepassten undurchdringlichen Bezug (wird separat verkauft). (Dieser Bezug macht das Kissen angenehmer fuer den Patienten und haelt es sauber.) Legen Sie das mit Kunststoff bezogene normale Intubationskissen auf das Plateau/den flachen Teil des mit Kunststoff bezogenen E.P.. Legen Sie ein Laken quer unter das E.P. Wenn der Patient nach Intubation auf dem O.P. Tisch weiter nach unten bewegt werden muss, (z.B. in die Lithotomy Position) kann man das Laken, das E.P. und den Patienten zusammen bewegen und der Patient bleibt in der gleichen Laryngoscopy Position mit erhoehetem Kopf.
2. Den O.P. Tisch ~ 5-10 Grad nach unten stellen. (Der Patient kann von der Tragbahre zum O.P. Tisch auf gleicher Ebene transferiert werden)
3. Die Schultern des Patienten sollten auf der oberen Welle des Elevation Pillow liegen. Der Kopf des Patienten sollte auf dem normalen Intubationskissen am oberen Rand des E.P. liegen.
4. Wenn der Patient auf dem O.P. Tisch liegt, mit dem Kopf auf dem E.P. und dem normalen Intubationskissen, den O.P. Tisch nach Bedarf ~ 5-10 Grad wieder nach oben stellen.
5. Die vorhandenen Armstuetzen mit Schaumstoff und/oder zusammengelegten Woldecken erhoehen, oder die (mit Kunststoff bezogenen) Armstuetzen benutzen (werden separat verkauft)... Artikel # 10-910-07
6. Normales Krankenhauskissen unter die Knie des Patienten legen.

VORSICHT: WAEHREND DER OPERATION GUT AUFPASSEN, DASS DER PATIENT NICHT MIT DEM KISSEN RUTSCHT, WENN DER O.P. TISCH IN STEILER TRENDELENBERG-POSITION IST.

Zu Ihrer Information: ein Muster des Troop E.P. Schutzbezuges (mit undurchdringlicher Barriere) ist beigegeben....um Infektionen zu vermeiden, benutzen Sie fuer jeden Patienten einen "neuen" Wegwerfbezug. Die Bezuege koennen zu 30 per Karton bestellt werden.
Artikel # 10-910-03

Mercury Medical, Clearwater Florida www.mercurymed.com **1-800-237-6418**
Teaching Web Site: www.troopelevationpillow.com


(Manufacturer)
CR Enterprises, LLC
4701 Augusta Drive
Frisco, Texas 75034

 Scanlon Group BV in the Netherlands
Tel: + 353 91 443609

Distributed by: Mercury Medical; Clearwater, Florida USA

